

Однокомпонентная система для ухода за стомой

Соберите принадлежности



Возьмите мешок, пакет для утилизации, салфетку и (или) кусок ткани для очистки и воду. Дополнительно: ножницы, ручка, измерительный инструмент, принадлежности.

Подготовьте кожный барьер и мешок



Перед каждым применением барьера измеряйте стому с помощью инструмента для определения размеров стомы (при использовании барьерного отверстия предварительно заданного размера переходите к шагу 7).

Нанесите пасту или добавьте кольца при необходимости



При необходимости приложите барьерное кольцо или нанесите каплю пасты вокруг отверстия, следуя инструкциям по применению.



Удалите использованную систему для ухода за стомой



Осторожно приподнимите край адгезивной пластины и потяните вниз, аккуратно отодвигая кожу от кожного барьера. Надлежащим образом утилизируйте использованный мешок. Смыть в унитаз запрещено!



Обведите барьерное отверстие нужного размера на кожном барьере. Кожный барьер должен подходить к месту пересечения кожи и стомы. Удостоверьтесь, что между кожным барьером и стомой не видно кожи, чтобы предотвратить утечку и раздражение кожи.

Разместите новую систему для ухода за стомой



Разместите отверстие кожного барьера над стомой точно по центру.

Закройте дно мешка. При использовании дренажного мешка закройте застежку **Lock 'n Roll** в нижней части мешка или примените зажим для мешка. Более подробную информацию о том, как использовать данную систему закрытия, см. в разделе *Советы по уходу за застежкой Lock 'n Roll*.

Очистите и высушите кожу



Очистите кожу водой или мягким мылом в соответствии с рекомендациями квалифицированного работника здравоохранения. Тщательно промойте и высушите. Не наносите на кожу масла, присыпку, лосьон или жидкое мыло.



Используя маленькие изогнутые ножницы, осторожно прорежьте отверстие в кожном барьере, чтобы оно соответствовало нанесенному рисунку. При вырезании не выходите за линию на защитной пленке. Не прокалывайте мешок.



Слегка надавите на кожный барьер примерно на минуту для обеспечения более надежной адгезии.



Проверьте состояние кожи



Удостоверьтесь, что кожа вокруг стомы (перистомально) не повреждена, на ней отсутствует раздражение, сыпь или покраснение*.

* Свяжитесь с вашей медсестрой WOC/NSWOC, если обнаружите раздражение, сыпь или покраснение.



Снимите защитную пленку с кожного барьера.



При наличии окантовки из клейкого материала удалите защитную бумагу с обеих сторон и аккуратно прижмите клейкую сторону к коже.

При использовании уростомного мешка удостоверьтесь, что сливной клапан закрыт. Капля на сливном клапане должна быть обращена к стороне мешка, обращенной к телу. При желании закройте крышку, находящуюся в коробке.

Однокомпонентная система для ухода за стомой

СОВЕТЫ	СПИСОК ПРОДУКТОВ	АРТИКУЛ
<ul style="list-style-type: none">• На коже вокруг стомы не должно быть признаков сыпи или повреждений.• Квалифицированный работник здравоохранения должен выполнить оценку раздраженной кожи.• При использовании барьерного кольца или пасты нанесите их на липкую сторону кожного барьера рядом с отверстием стомы в соответствии с указаниями.• Ваша стома, вероятно, будет отечной после операции. Может потребоваться от нескольких недель до месяцев, чтобы стома уменьшилась до постоянного размера.• Стома может немного кровоточить при ее очистке.• Использование защитных салфеток для кожи под кожными барьерами длительного ношения не рекомендуется, потому что это может уменьшить время ношения.	Однокомпонентная система для ухода за стомой Принадлежности	_____
	Барьерные кольца	_____
	Бандаж для стомы	_____
	Паста	_____
	Смазывающий дезодорант	_____
	Присыпка для ухода за стомой	_____
	Прочее _____	_____

Дополнительные инструкции

Если у вас возникнут вопросы по продуктам, отбору проб или подробные клинические вопросы, касающиеся наших продуктов в США, звоните по телефону 1.888.808.7456. В Канаде звоните по телефону 1.800.263.7400.

www.hollister.com

Перед прикреплением кожного барьера кожа должна быть очищена и высушена.

Обязательно прочтите инструкцию по применению перед использованием, чтобы получить информацию о назначении, противопоказаниях, предупреждениях, мерах предосторожности и инструкциях.

Логотип компании Hollister, Lock 'n Roll и «Здоровая кожа. Положительные результаты.» являются товарными знаками компании Hollister Incorporated. © Hollister Incorporated, 2018. 923069-1118 US-00667